

Chamber Brite™ - Autoklaven Reinigungspulver

Tuttnauer™
Your Sterilization & Infection Control Partners

Chamber
Brite



Selbstreinigende Portionsbeutel für alle Dampf-Autoklaven mit Edelstahlkammer

Chamber Brite Pulver, der einfache leichte Weg zur Werterhaltung Ihres Autoklaven. Chamber Brite reinigt und löst Ablagerungen in der Sterilisierkammer, im Wasserbehälter und in den Kupferrohren in Minutenschnelle vollautomatisch.

- Portionsbeutel, immer richtig dosiert
- Reinigt Wasserbehälter, Sterilisierkammer und Kupferrohre
- Einfach in die Sterilisierkammer streuen und einen Zyklus starten
- Ersetzt Flüssigreiniger und schont Ihre Sterilisierkammer



Chamber Brite™ - Autoklaven Reinigungspulver

Nur sechs einfache Schritte zur problemlosen Reinigung



- Reinigungsanleitung:
1. Chamber Brite Pulver auf dem Boden des kalten Autoklaveninnenraums verteilen.



2. Einen Sterilisationszyklus MIT WASSER und OHNE NACHTROCKENZYKLUS starten.



3. Am Ende des Zyklus die Lösung aus dem Reservoir ablassen und verwerfen.
4. Das Reservoir füllen und die Schritte 2 und 3 ohne Chamber-Brite wiederholen.



5. Die Sterilisierkammer mit einem feuchten Lappen oder Schwamm auswischen.



6. Das Reservoir mit destilliertem Wasser füllen und der Sterilisator ist gebrauchsbereit.



Wir empfehlen, den Autoklaven alle 20 Zyklen oder einmal pro Woche zu reinigen. Es sind die Anweisungen des Geräteherstellers bezüglich Reinigung und Wartung zu beachten.

Hinweis: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Augenkontakt oder bei Verschlucken sofort mit viel Wasser spülen bzw. trinken und einen Arzt aufsuchen.

Inhaltsstoffe:
Sodium Gluconate, LD50 1000 mg/Kg
Citric Acid, LD50 1000 mg/Kg
Polyethylen Oxid Alcohol, LD50 2000 mg/kg
Verpackung: 10 Btl. je Schachtel



Fully Automatic
E Series



Manual
M Series



2540EL

Tuttnauer's Tischautoklaven

Tuttnauer Europe b.v.

Paardeweide 36, 4824 EH, P.O.B. 7191, 4800 GD, Breda, The Netherlands
Tel: +31 (0) 765423510, Fax: +31 (0) 765423540, E-mail: info@tuttnauer.nl
Tuttnauer Generalvertretung Deutschland Otto-Brenner-Str. 21, 46483 Wesel
Tel: 0281-98 49 80, Fax: 0281-98 49 830, E-mail: nasse-wesel@t-online.de

Tuttnauer
Your Sterilization & Infection Control Partners